


# SNAPSTOP

## Gebruiksaanwijzing


SNAPstop is een plantair flexiestop voor enkel-voet-orthesen.

- 1) Start wanneer uw gipspositief gecorrigeerd en opgekuist is en trek er een nylon kous over..
- 2) Kleef de dummy met de dunste kant (A) naar het gipsmodel en zorg dat de onderste rand ervan op dezelfde hoogte ligt als het draaipunt van de enkel. De dummy moet bevestigd worden met de (bijgeleverde) nagel in de hierboven beschreven positie. De dummy bevindt zich dus over de kous.

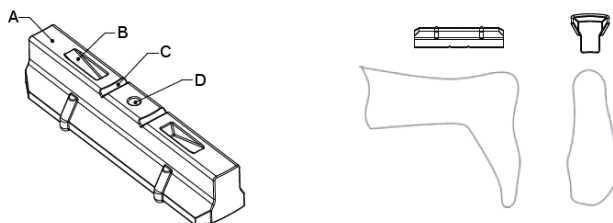


- 3) Klop het bijgeleverde nageltje door de opening in het midden van de dummy in de gips, zodat alles vast blijft zitten tijdens het vacuümtrekken (D). U kan eventueel de kop van de nagel aftoppen/afknippen.
- 4) Trek nu de plastic vacuum over het geheel. Zorg dat de plastic voldoende verhit zodat hij goed kan getrokken worden. Zorg ervoor dat de dummy zich niet verplaatst.
- 5) Haal de schelp van het gipsmodel, wanneer de plastic goed afgekoeld is. De dummy zit nu in de plastic verzonken. Verwijder de nagel door hem met een tang door de dummy te trekken.

- 6) Identificeer, vanaf de binnenzijde, het boorgat(D) op de dummy en doorboor he met een boortje van 1,6 - 2mm (1/16"), van binnen naar buiten toe. Dit gat wordt gebruikt als basis voor de trimlijn.
- 7) Trek een horizontaal streepje aan beide kanten van het gat en trek ze door tot aan de centerpunten van de scharnieren. Dit is de trimlijn.

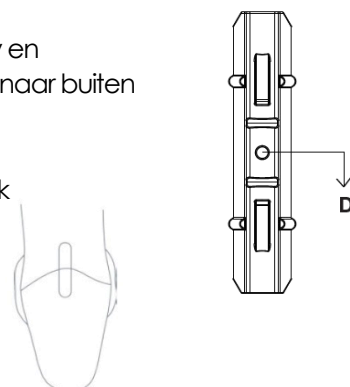


- 8) Snijd accuraat op de trimlijn, doorheen de dummy.
- 9) Localiseer vanaf de binnenzijde de afschuurlijn (C) en trek met een stift een horizontaal lijntje aan beide kanten van deze afschuurlijn. Dit verhoogt de zichtbaarheid bij het afwerken van de randen.

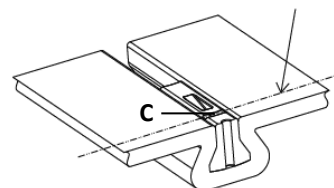


10) Schuur de plastic af tot aan de afschuurlijn (C), maar hou de hoeken van de kanten recht.  
Ga niet voor bij de lijn.


11) Localiseer de uitsparing(B) in de dummy, net boven de afschuurlijn. Steek er een platte schroevendraaier in en gebruik wat druk om één stuk van de dummy eruit te schuiven.

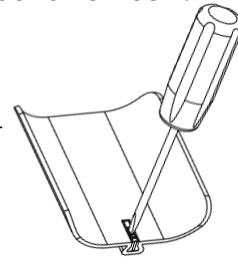

12) Het ander uiteinde van de dummy blijft zitten en dient als impactvlak voor de bewegingsstop. Verwijder deze niet, tenzij u een bijkomende SNAPstop wenst te gebruiken .

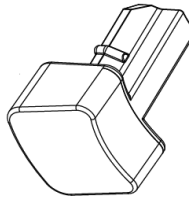

13) Schuif nu de juiste SNAPstop in het kanaal met de concave kant naar het been toe, tot wanneer u een klik voelt en hoort.

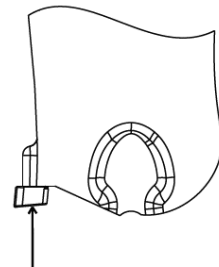

**Dit artikel mag enkel gebruikt worden voor het beoogde doel en moet verwerkt worden onder leiding van een erkend orthopedisch instrumentmaker, volgens de hier beschreven gebruiksinstructies.**



[www.launchpad-europe.eu](http://www.launchpad-europe.eu)

Manufactured by LaunchPad O&P  
2545 Chicago Ave, Suite 507, Minneapolis, MN 55404 USA

Authorized Representative EU:  
Dirame Ortho, ASSESTEENWEG 27-29, B-1740 TERNAT, Belgium  
T: +32 (0)2 582 82 50 / F: +32 (0)2 582 61 12

